


108801

(з вмістом 3.3 мл Арафіх)

APACOR

Фекальний паразитологічний концентратор
Міні Parasер без розчинника

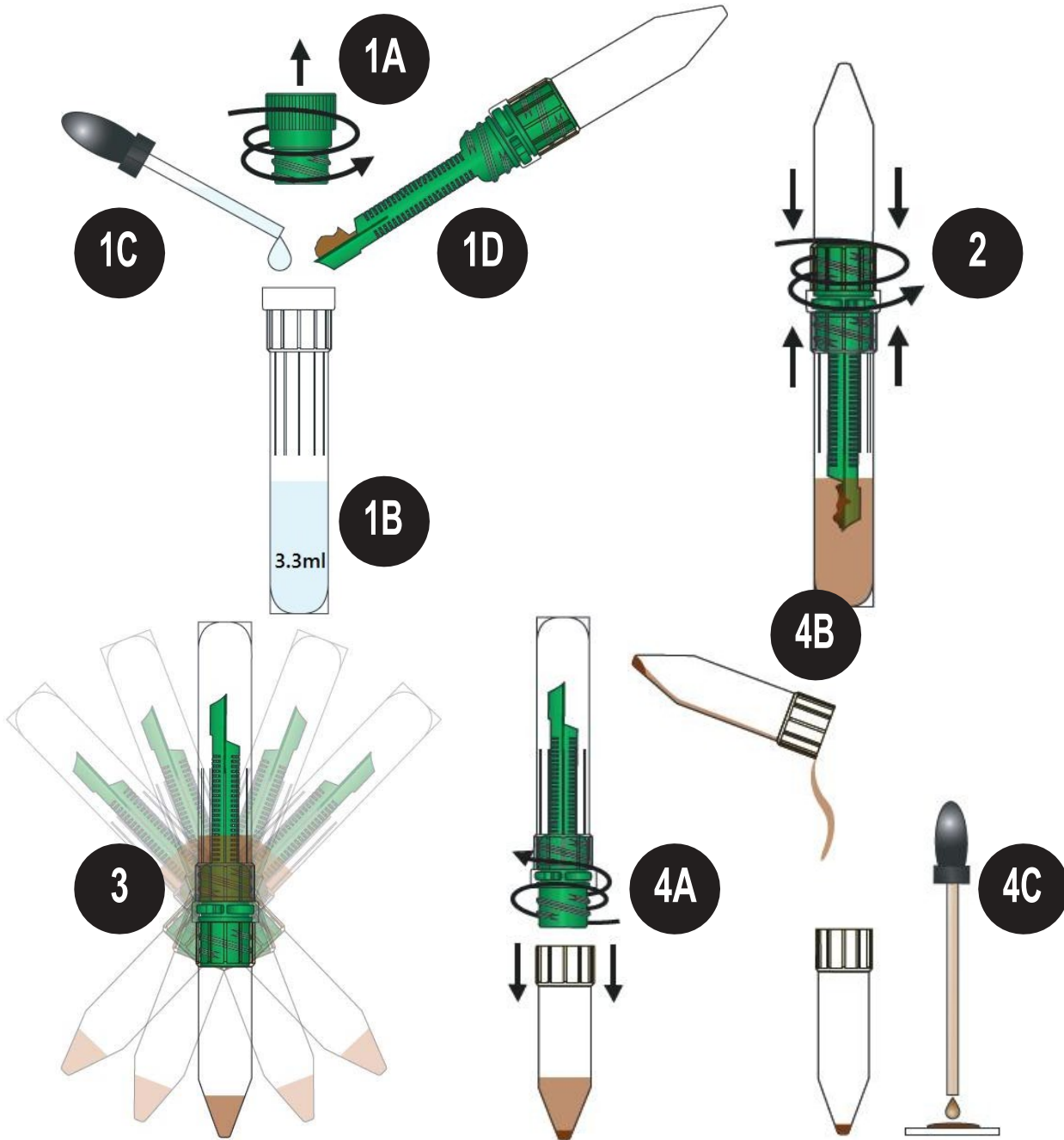

Умови зберігання та термін придатності дивитися на етикетці.

Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче вказівок під час роботи з Mini Parasep® SF. Щоб уникнути перехресного забруднення, концентратор Mini Parasep® SF повинен завжди бути закритим, крім випадків, коли проводиться внесення зразка або отримання концентрованого зразка для дослідження.

Підготовка зразка

Якщо використовується попередньо заповнений Mini Parasep® SF, перейдіть до пункту 1D

- 1A Відкрутити кришку.
- 1B Додати 3,3 мл фіксативу.
- 1C Додати одну краплю поверхнево-активної речовини (наприклад, розчину Арасог Тритон X) у камеру.
- 1D Внести мірну ложку зі зразком калу у фіксатив за допомогою лопатки на кінці фільтру Mini Parasep® SF. Ретельно перемішати за допомогою лопатки Mini Parasep® SF. Якщо зразок твердий, розбийте його кінцем лопатки.

Емульгування

- 2 Герметично закрити Mini Parasep® SF, закрутивши фільтр/конус для осадження. Вихровими рухами або струшуванням, перетворити на емульсію, тримаючи прилад конусом для осадження вгору.

Центрифугування

- 3 Перевернути Mini Parasep® SF і центрифугувати при 400 g протягом 2 хвилин.
(J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.00838-15)

Mini Parasep® SF підходить для всіх отворів центрифуги об'ємом 15 мл.

ПРИМІТКА: Для обчислення необхідної кількості RPM (об/хв) будь-якої центрифуги

$$RPM = \sqrt{\frac{g}{1.12r}} \cdot 1000$$

RPM	Швидкість обертання ротора в об/ хв
g	Сила центрифуги (макс. 1000 g)
r	Радіус, горизонтальна відстань між верхівкою конуса для осадження та центром шпинделя, виміряна в мм

Тестування

- 4A Відкрутити та викинути фільтр та трубку для змішування.
- 4B Злити всю рідину, яка утворилася над осадом.
- 4C Піпетувати одну краплю осаду на слайд і накрити покривним скельцем.
Крім того, дотримуйтесь лабораторних стандартних правил з експлуатації для підготовки слайдів.

Фекальний паразитологічний концентратор MiniParasep® без розчинника



Кат. номер	Продукт
108800	Mini Parasep® SF
108801	Mini Parasep® SF Apafix™
108810	Mini Parasep® SF AlcorFix™
108900	Mini Parasep® SF Formalin & Triton X
108920	Mini Parasep® SF SAF & Triton X
108935	Mini Parasep® SF MIF & Triton X

Утилізувати клінічні відходи відповідно до стандартних та місцевих процедур експлуатації.

Продукцію можна замовити безпосередньо у Аракор або у призначеного дистриб'ютора
Щоб отримати найсвіжішу інформацію, відвідайте наш веб-сайт www.apacor.com або
електронну пошту: orders@apacor.com



ВИРОБНИК
АПАКОР ЛІМІТЕД
ЮНІТ 5 САПФІР ЦЕНТР
ФІШПОУНДС РОУД, ВОКІНГЕМ
БЕРКШИР, RG41 2QL, АНГЛІЯ ТЕЛ.:
+44 (0)118 979 5566
ФАКС: +44 (0)118 979 5186



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-пошта: info@diameb.ua
www.diameb.ua

