


108900

(з вмістом 3,3 мл формаліну + тритон-Х)

APACOR

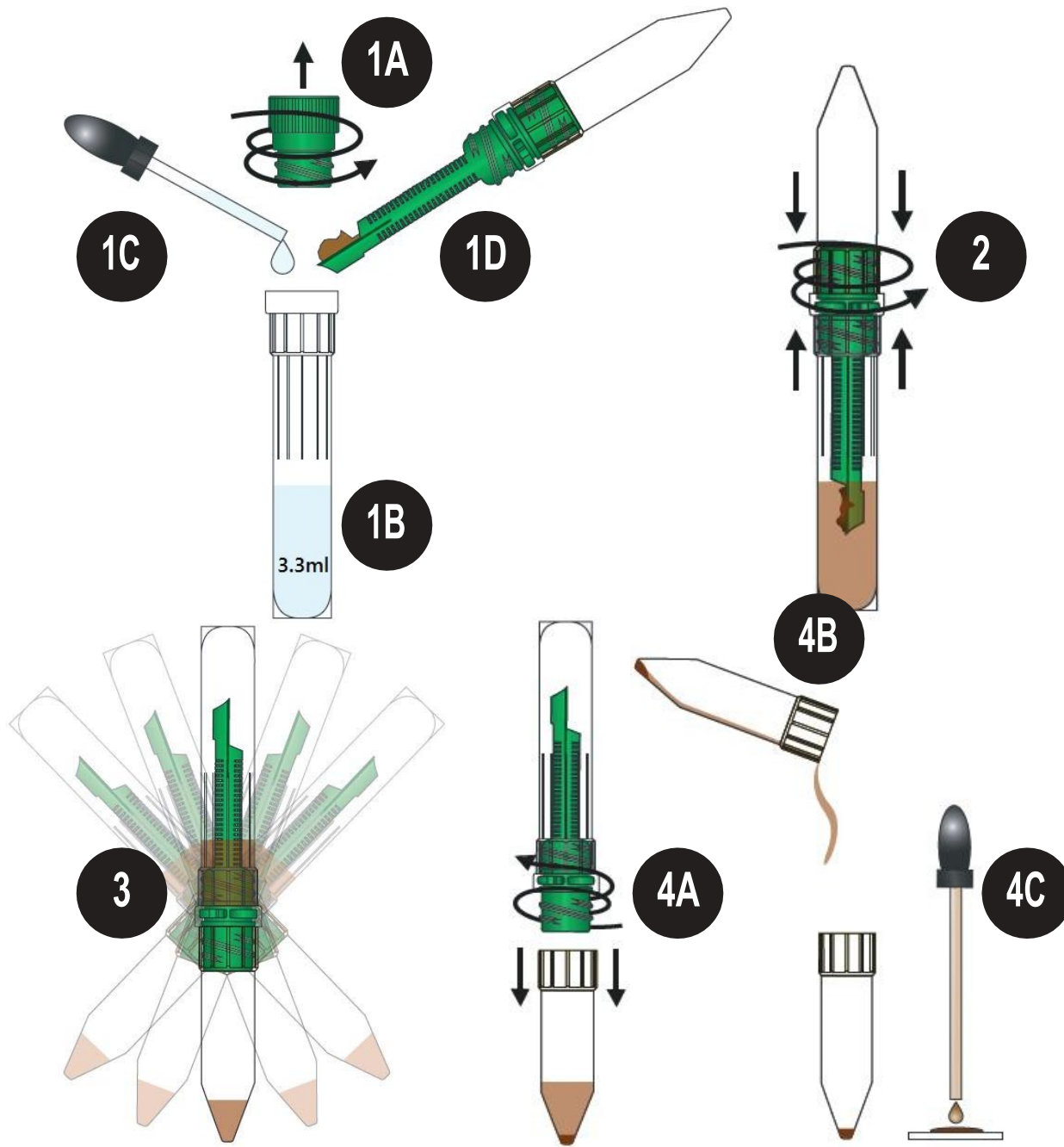

Фекальний паразитологічний концентратор
Mini Paraser[®] без розчинника

APA179
V4 03/2019

Умови зберігання та термін придатності дивитися на етикетці.
Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче вказівок під час роботи з Mini Parasep® SF.
Щоб уникнути перехресного забруднення, концентратор Mini Parasep® SF повинен завжди бути закритим, крім випадків, коли проводиться внесення зразка або отримання концентрованого зразка для дослідження.

Підготовка зразка

Якщо використовується попередньо заповнений Mini Parasep® SF, перейдіть до пункту 1D

- 1A Відкрити кришку.
- 1B Додати 3,3 мл фіксативу.
- 1C Додати одну краплю поверхнево-активної речовини (наприклад, розчину Арасог Тритон X) у камеру.
- 1D Внести мірну ложку зі зразком калу у фіксатив за допомогою лопатки на кінці фільтру Mini Parasep® SF. Ретельно перемішати за допомогою лопатки Mini Parasep® SF. Якщо зразок твердий, розбийте його кінцем лопатки.

Емульгування

- 2 Герметично закрити Mini Parasep® SF, закрутивши фільтр/конус для осадження. Вихровими рухами або струшуванням, перетворити на емульсію, тримаючи прилад конусом для осадження вгору.

Центрифугування

- 3 Перевернути Mini Parasep® SF і центрифугувати при 400 g протягом 2 хвилин.
(J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.00838-15)

Mini Parasep® SF підходить для всіх отворів центрифуги об'ємом 15 мл.
ПРИМІТКА: Для обчислення необхідної кількості RPM (об/хв) будь-якої центрифуги

$$RPM = \sqrt{\frac{g}{1.12r}} \cdot 1000$$

RPM	Швидкість обертання ротора в об/ хв
g	Сила центрифуги (макс. 1000 g)
r	Радіус, горизонтальна відстань між верхівкою конуса для осадження та центром шпинделя, виміряна в мм

Тестування

- 4A Відкрити та викинути фільтр та трубку для змішування.
- 4B Злити всю рідину, яка утворилася над осадом.
- 4C Піпетувати одну краплю осаду на слайд і накрити покривним скельцем.
Крім того, дотримуйтесь лабораторних стандартних правил з експлуатації для підготовки слайдів.

**Фекальний паразитологічний концентратор
MiniParasep® без розчинника**



Кат. номер	Продукт
108800	Mini Parasep® SF
108801	Mini Parasep® SF Apafix™
108810	Mini Parasep® SF AlcorFix™
108900	Mini Parasep® SF Formalin & Triton X
108920	Mini Parasep® SF SAF & Triton X
108931	Mini Parasep® SF SafEFix™ Ecological Fixative
108932	Mini Parasep® SF SafEFix™ Colour Ecological Fixative
108935	Mini Parasep® SF MIF & Triton X

Утилізувати клінічні відходи відповідно до стандартних та місцевих процедур експлуатації.

Продукцію можна замовити безпосередньо у Арасор або у призначеного дистриб'ютора
Щоб отримати найсвіжішу інформацію, відвідайте наш веб-сайт www.apacor.com або
електронну пошту: sales@apacor.com



Виробник

APACOR
ЮНІТ 5 САПФІР ЦЕНТР ФІШПОНДСРОУД
ВОКІНГЕМ БЕРКШИР, RG41 2QL, АНГЛІЯ
ТЕЛ.: +44 (0)118 979 5566
ФАКС: +44 (0)118 979 5186



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

