



MAGLUMI[®] Речовина для вивільнення зі зразків

■ ПРИЗНАЧЕННЯ

Речовина для вивільнення зі зразків — це реагент для *in vitro* діагностики, призначений для екстрагування зі зразків специфічних аналізованих компонентів. Цей реагент використовується разом зі спеціальними імуноаналізами, що виконують на повністю автоматичному хемілюмінесцентному імуноаналізаторі серії MAGLUMI й інтегрованій системі серії Biolumi.

■ СТИСЛИЙ ОПИС

Попередня обробка зразків цільної крові для аналізу на фолієву кислоту. Основною функцією речовини для вивільнення зі зразків є лізис еритроцитів. Змінюючи осмотичний тиск розчину, можна викликати розрив еритроцитів для досягнення мети вивільнення фолієвої кислоти з еритроцитів.

■ НАДАНІ КОМПОНЕНТИ

REF	Компонент	Опис	Специфікація
130299026M	Речовина для вивільнення зі зразків	Аскорбінова кислота	4 × 0,2 г (g)

■ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Призначено для діагностики *in vitro*.
- Лише для професійного використання.
- Вживайте звичайних застережних заходів, обов'язкових під час роботи з усіма лабораторними реагентами.
- Слід використовувати засоби індивідуального захисту для уникнення контакту будь-яких частин тіла зі зразками й дотримуватися місцевих вимог щодо роботи під час підготовки зразків.
- Усі матеріали й контейнери мають бути утилізовані відповідно до вимог місцевих нормативів.
- Паспорти безпечності речовин надаються на вимогу.
- Під час попередньої обробки зразків уникайте утворення бризок чи аерозолів.
- Примітка. Про будь-які серйозні інциденти, пов'язані з пристроєм, слід повідомляти компанію Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (Snibe) або її вповноважених представників, а також компетентні органи вашої країни.

■ ПРОЦЕДУРА

- Цей набір містить пластикову пляшку ємністю 100 мл із речовиною для розчинення.
- Після розчинення речовини для вивільнення зі зразків добре перемішайте рідину для її подальшого використання.
- Детальна інформація про попередньо оброблені зразки наведена у вкладиші упаковки відповідних реагентів.


■ ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

- У непорушеному оригінальному флаконі при температурі (2–8) °C у темному місці можна зберігати до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках.

Інструкція із застосування

- Розчинена речовина для вивільнення зі зразків може залишатися стабільною протягом 14 днів при зберіганні герметично закритою при температурі 2–8 °C у темному місці.
- Бережіть від прямих сонячних променів.

■ ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

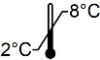	Див. інструкцію із застосування		Виробник
	Температурний діапазон (зберігати при температурі 2–8 °C)		Тримайте захищеним від прямих сонячних променів
	Номер за каталогом		Кінцева дата терміну придатності
	Медичний пристрій для діагностики <i>in vitro</i>		Код партії
	Уповноважений представник у Європейському союзі		Компоненти набору
	Маркування CE		Цим боком догори
	Унікальний ідентифікатор пристрою		Імпортёр
	Знак відповідності технічним регламентам		

MAGLUMI® та Biolumi® є торговими марками компанії Snibe. Усі інші найменування продуктів і торгові марки належать відповідним власникам.




Шеньчжень Нью Індастріс Біомедікал Інжиніринг Ко., Лтд.,

№23 Джінксіу Еаст Род, Пінгшан Дістрікт, 518122 Шеньчжень, Китайська Народна Республіка

Тел.: +86 755 21 53 66 01

Факс: +86 755 28 29 27 40

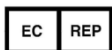

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Тел.: +49 40 25 13 175

Факс: +49 40 25 57 26



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Кратія Медтехніка», вул. Багговутівська, 17-21, 04107, м. Київ, Україна.

Тел.: 0 800 21-52-32 (безоплатно можуть телефонувати абоненти фіксованого та мобільного телефонного зв'язку з будь-якої точки України).

Електронна пошта: uarep@cratia.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: травень 2022 року.