

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ DIA-WASH

Dia-Wash

Кат. №: 13180

Дата випуску інструкції: 26.08.2019
Версія: 2



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: 13180

12 x 15 мл (ml)

НАЗВА ПРОДУКТУ

Реагент для промивання Dia-WASH.

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для діагностики In Vitro)

Розчин Dia-WASH призначений для щоденного обслуговування і очищення автоматичних коагулометрів для діагностичних вимірювань.

КОРОТКИЙ ОПИС І ПРИНЦИП

Розчин Dia-WASH є кислотним розчином для промивання, який ефективно очищає відсіки коагулометрів.

АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

Розчин Dia-WASH містить соляну кислоту (< 1.0%).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Особа, яка встановлює розчин Dia-WASH, має бути навченим лабораторним фахівцем!
- Всі реагенти, відходи та використане одноразове лабораторне обладнання слід розглядати як небезпечні відходи. Їх слід обробляти та утилізувати відповідно до чинних правил щодо обробки небезпечних матеріалів.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці.

ПІДГОТОВКА

Розчин Dia-WASH готовий до використання. Дочекайтесь, поки розчин досягне робочої температури!

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Розчин Dia-WASH у невідкритих флаконах залишається стабільним до дати закінчення терміну, що вказана на флаконі, за умови зберігання при температурі 2-8 °C (°C). Стабільність після відкриття в оригінальному флаконі показано у таблиці нижче:

| Температура (°C (°C)) | 20-25 | 15-19 |
|-----------------------|-------|-------|
| Днів | 7 | 7 |

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

При щоденному використанні, розчин Dia-Wash ефективно очищує голки у приладі, щоб забезпечити перенесені значення у межах специфікації.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

- Для використання вказаних тестів на автоматичному аналізаторі Coag Line:
 - Dia-PROTEIN C (хромогенний); Кат. №: 07108
 - Dia-PROTEIN S (згортання); Кат. №: 07204
- Рекомендуються оптичний або механічний коагулометр для вимірювання та аналізатори Diagon (Coag Line).

| СИМВОЛИ | | | |
|---------|---|--|---|
| | Виробник | | Термін придатності |
| | Код партії | | Каталоговий номер |
| | Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена | | Крихке, поведіться обережно |
| | Зберігайте в сухому місці | | Обмеження температури |
| | Обережно | | Зверніться до інструкції з використання |
| | Містить достатньо для <n> тестів | | Медичний виріб для діагностики in vitro |
| | Знак CE | | Цією стороною вгору |



ВИРОБНИК

DIAGON LTD.
Baross str. 48-52, H-1047
Budapest, Hungary
Tel.: +36 1 3696500
Fax.: +36 1 3696301
Web: www.diagon.com
E-mail: diagon@diagon.com

ТОВ ДІАГОН
вул. Барош, 48-52, H-1047
Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: +36 1 3696301
Веб-сайт: www.digon.com
E-novtma: diagon@diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

