

АНТИСТРЕПТОЛІЗИН О КАЛІБРАТОР

CORMAY ASO CALIBRATOR



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

Кат. №: **4-278**

Дата випуску інструкції: **12-2023**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY ASO CALIBRATOR	1 x 5 мл (ml)	4-278

ПРИЗНАЧЕННЯ

Калібратор CORMAY ASO CALIBRATOR призначений для калібрування визначень антистрептолізину О на автоматичних аналізаторах. Калібратори повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

ВСТУП

Більшість людей, інфікованих гемолітичним стрептококом, виробляють антистрептолізин О (АСО), антитіла до стрептолізину О (SLO), екзотоксину Стрептокока. Вимірювання рівня АСО ефективно для діагностики, оцінки прогресу лікування та оцінки відновлення після захворювань, викликаних гемолітичним стрептококом, таких як: ревматизм, гострий гломерулонефрит, скарлатина і тонзиліт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калібратор CORMAY ASO готують шляхом розбавлення антистрептолізину О з фізіологічним розчином, що містить 1% маса/об'єм бичачого сироваткового альбуміну, для отримання концентрованого розчину 500 МО/мл ((IU/ml).

ПРИСВОЄНІ ЗНАЧЕННЯ

Точні концентрації антистрептолізину О (АСО) зазначені на етикетці кожного флакона.

СКЛАД НАБОРУ

ASO CALIBRATOR 1 x 5 мл (ml)

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Калібратор готовий до використання.

Нерозкритий калібратор стабільний при температурі 2-10 °С (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі.

Після першого відкриття калібратор стабільний упродовж 10 тижнів при 2-10 °С (°C).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Захищати від прямих сонячних променів і уникати забруднення!
- Не змішувати калібратори з інших партій або наборів.
- Калібратор базується на сироватці крові людини, яка була протестована на HBsAg та антитіла до ВІЛ та ВГС, і було виявлено, що вона не реактивна. Проте, з цим матеріалом необхідно поводитись як з таким, що здатний передавати інфекційне захворювання.
- Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори АСО готуються з посиланням на стандарт NIBSC 97/662.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

