

ІМУНОГЛОБУЛІН Е КАЛІБРАТОРИ

CORMAY IgE CALIBRATORS

Кат. №: 4-280

Дата випуску інструкції: 02-2012



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору
CORMAY IgE CALIBRATORS

Склад набору
5 x 2 мл (ml)

Кат. №
4-280

ВСТУП

IgE є імуноглобуліном з молекулярною вагою близько 190 кД (kD), який зазвичай присутній в крові в достатніх для простеження кількостях. Однак, постійне вироблення антитіл класу IgE у відповідь на спільні природні алергени часто призводить до підвищення рівня сироватки і розвитку таких клінічно важливих алергічних реакцій I типу, як астма, сінна лихоманка, дерматит і харчова алергія. Підвищені рівні IgE також спостерігаються при паразитарних (гельмінтних) захворюваннях, IgE-мієломі, і при гепатиті. Таким чином, вимірювання IgE в сироватці крові людини вважається корисним в діагностиці, лікуванні, оцінці прогресування захворювання або післяопераційного прогнозу за таких умов.

Набір CORMAY IgG CALIBRATORS готується шляхом розведення IgE буферним розчином, що містить 1 в/о % бичачого сироваткового альбуміну різних концентрацій. Концентрації вказані на кожному флаконі і в цьому вклядиші до набору.

Набір CORMAY IgE CALIBRATORS повинен використовуватися для калібрування визначень IgE на автоматичних аналізаторах.

УПАКОВКА

Колір ковпачка	Концентрація IgE	Об'єм
КРЕМОВИЙ	50 О/мл (U/ml)	1 x 2 мл (ml)
ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ	100 О/мл (U/ml)	1 x 2 мл (ml)
СИНИЙ	200 О/мл (U/ml)	1 x 2 мл (ml)
РОЖЕВИЙ	500 О/мл (U/ml)	1 x 2 мл (ml)
ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ	1000 О/мл (U/ml)	1 x 2 мл (ml)

Калібратори готові до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Нерозкритий калібратор стабільний при температурі 2-10 °C (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі. Захищати від світла.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Так як колір ковпачків змінюється залежно від концентрації IgE у флаконах, будьте уважні не переплутати ковпачки.
- Не змішувати калібратори з калібраторами з інших флаконів.
- Використовувати калібратори відповідно до даної інструкції.
- Калібратори засновані на людській сироватці, яка була протестована на наявність антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) і гепатиту С (ВГС) і антитіл до ВІЛ, і виявилися нереактивними. Тим не менш, з ними необхідно поводитись як з потенційно біологічно небезпечним матеріалом з дотриманням усіх необхідних заходів обережності.
- Калібратори містять азид натрію (< 0.1%) в якості консерванту. Уникайте контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратори IgE готуються відповідно до стандартів ВООЗ.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

