

ІМУНО-МУЛЬТИКАЛІБРАТОР

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

Кат. №: **4-287**

Дата випуску інструкції: **12-2023**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору

CORMAY IMMUNO-MULTICAL

Склад набору

5 x 1 мл (ml)

Кат. №

4-287

ПРИЗНАЧЕННЯ

CORMAY IMMUNO-MULTICAL призначений для використання як калібратор мультианалітів при вимірюванні різних білків в сироватці людини. Використовувати відповідно до інструкцій до реагентів для визначення специфічних білків.

Реагенти повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, у відповідних лабораторних умовах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CORMAY IMMUNO-MULTICAL є біологічною рідиною людини, розведена в буфері HEPES (pH 7.4), що містить стабілізатори і наступні білки людини: альфа-1 антитрипсин, альфа-1 кислий глікопротеїн, антитромбін III, комплемент C3, комплемент C4, церулоплазмін, гаптоглобін, IgA, IgG, IgM і трансферин.

ЗАДАНІ ЗНАЧЕННЯ

Значення для окремих білків специфічні для кожної партії наведені на аркуші для аналізів, що входить до складу набору.

СКЛАД НАБОРУ

IMMUNO-MULTICAL 1	1 x 1 мл (ml)
IMMUNO-MULTICAL 2	1 x 1 мл (ml)
IMMUNO-MULTICAL 3	1 x 1 мл (ml)
IMMUNO-MULTICAL 4	1 x 1 мл (ml)
IMMUNO-MULTICAL 5	1 x 1 мл (ml)

ПІДГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ

Калібратори готові до використання.

При 2-8 °C (°C) калібратори стабільні до дати, зазначеної на упаковці. Зберігати закритими, уникати контамінації.

ПРИМІТКИ

1. Цей калібратор був протестований на антитіла до ВІЛ, HBsAg і ВГС і виявився неактивним. Проте з цим матеріалом слід поводитися як з потенційно інфекційним.
2. Звертатися до паспорту безпеки для отримання детальної інформації щодо безпечного зберігання та використання продукту.

ВІДСТЕЖУВАНІСТЬ

Задані значення наведені за референсним матеріалом ERM DA470k/IFCC.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.

ЛІТЕРАТУРА

1. Johnson, A.M.: A new international preparation for proteins in human serum, Arch. Pathol. Lab. Med. 117 (1993) 29-31.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянкі, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

