

АПОЛІПОПРОТЕЇН КАЛІБРАТОРИ

CORMAY APOLIPROTEIN CALIBRATORS

Кат. №: 4-289

Дата випуску інструкції: 01-2008



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY APOLIPROTEIN CALIBRATORS	5 x 0.5 мл (ml)	4-289

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

КАЛІБРАТОРИ АПОЛІПОПРОТЕЇНУ CORMAY призначені для використання в якості калібраторів при вимірюванні концентрації аполіпопротеїнів А1 та В. Використовуйте згідно з інструкціями до реагентів для визначення певних аполіпопротеїнів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАЛІБРАТОРИ АПОЛІПОПРОТЕЇНУ CORMAY - це біологічна рідина людини, яка містить аполіпопротеїни А1 та В у фіксованих значеннях та азид натрію (<1 г/л (g/l)) в якості консерванта.

ПІДГОТОВКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

Калібратори готові до використання.
Калібратори, що зберігаються при 2-8 °С (°C), стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Зберігати закритими та уникнути забруднення.

ПРИМІТКИ

1. Продукт призначений тільки для діагностичного використання in vitro.
2. Калібратори повинні використовуватися тільки за призначенням, відповідним кваліфікованим персоналом лабораторії, у відповідних лабораторних умовах.
3. Цей калібратор був протестований на антитіла проти ВІЛ-інфекції, HBsAg та ВГС, і виявилось, що він не реактивний. Однак цей матеріал слід розглядати як такий, що здатний передавати інфекційне захворювання.
4. Калібратори містять азид натрію (<1 г/л (g/l)) в якості консерванта. Уникати контакту зі шкірою та слизовими оболонками.

ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

Приписані значення для конкретних білків, що відрізняються від партії до партії, наведені на етикетці кожного флакону.

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Значення отримані з довідкового матеріалу: SP1-01 та SP3-07.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

