

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД 0.025M Dia-CaCl₂

Dia-CaCl₂

Каталог. №: 41048

Дата випуску інструкції: 15-09-2017
Версія: 7



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: 41192

12 x 16 мл

Кат. №: 41048

12 x 4 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

Розчин Dia-CaCl₂.

ПРИЗНАЧЕННЯ

(Тільки для діагностики In Vitro)

Dia-CaCl₂ – це додатковий реагент лабораторії, двоступеневий скринінговий тест АРТТ.

АКТИВНІ ІНГРІДІЄНТИ

Dia-CaCl₂– 0,025M буферний розчин із консервантом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Людина, що встановлює розчин Dia-CaCl₂, повинна бути кваліфікованим лаборантом!
- Реагент, який вступає в контакт зі зразками або іншими матеріалами потрібно обробляти так, ніби він здатний передавати інфекцію та утилізувати відповідно до вимог!
- Уникайте мікробного забруднення реагенту, щоб не отримати помилкові результати.
- Всі реагенти, відходи та використане одноразове лабораторне обладнання слід розглядати як небезпечні відходи! Їх слід обробляти та утилізувати відповідно до чинних правил щодо обробки небезпечних матеріалів.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, який вказаний на етикетці!

ПІДГОТОВКА

Розчин Dia-CaCl₂ готовий до використання. Почекайте поки реагент досягне робочої температури!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

Дійте відповідно до інструкції Dia-PTT або Dia-PTT LIQUID тестів для вимірювання необхідного параметра.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Невідкриті флакони Dia-CaCl₂ стабільні до дати закінчення терміну придатності, вказаного на флаконі, за умови зберігання при температурі 2-8 °С. Стабільність після відкриття в оригінальному флаконі показана у таблиці нижче:

T (°C)	37	15 - 19	2 - 8
тиждень	1 день	8	8

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

- АРТТ:
 - Dia-PTT (Кат. №: 71024; 71030; 71048)
 - Dia-PTT LIQUID (Кат. №: 72012; 72024; 72048; 72096)
- Різні рівні контролю для контролю якості (Dia-CONT I-II; Кат.№: 91020, 91010).
- Для вимірювання рекомендується оптичний або механічний коагуляційний аналізатор, аналізатори Diagon (Coag Line).

СИМВОЛИ

	Виробник		Використати до
	Код партії		Каталоговий №
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена		Обережно, скло
	Зберігати в сухому місці		Температурна межа
	Застереження		Прочитайте інструкцію щодо використання
	Містить достатньо для <n> тестів		In vitro діагностичний медичний пристрій
	Знак CE		Ця сторона вгору



ВИРОБНИК

ДІАГОН ЛТД.
вул. Барош, 48-52,
H-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 1 3696500
Факс: +36 1 3696301
Web: www.digon.com
e-mail: diagon@diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

