

**КОНТРОЛЬНА СИРОВАТКА
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЖОВЧНИХ
КИСЛОТ**



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул.Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

Каталог. №: **5-149**
Виробник: **Cormay (Польща)**

Методика від **02-2012**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY BILE ACIDS CONTROLS	2 x 1мл	5-149

CORMAY BILE ACIDS CONTROLS призначені для поточного контролю концентрації жовчних кислот у сироватці крові людини. Набір містить ліофілізовані контролі двох рівнів (низький - L і високий - H).

ПАКУВАННЯ

	Розмір
BILE ACIDS CONTROL (L)	1 x 1 мл
BILE ACIDS CONTROL (H)	1 x 1 мл

ПРОЦЕДУРА

- Обережно відкрийте флакон і додайте рівно 1 мл деіонізованої води.
- Закрийте пляшку і залиште на 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Злегка перемішайте кілька разів, щоб переконатись, що вміст повністю розчинено.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

- Ліофілізована сироватка залишається стабільною при зберіганні при -20 °C до дати закінчення терміну придатності на етикетці.
- Компоненти у розведеній контрольній сироватці стабільні упродовж 2 тижнів при температурі від 2 до 8 °C.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ПРИМІТКИ

- Продукт призначений тільки для діагностики in vitro.
- Контролі повинні використовуватися тільки відповідно до призначеного використання, кваліфікованим персоналом лабораторії, у відповідних лабораторних умовах.
- Не використовуйте контролі після закінчення терміну дії.
- Контролі базуються на бичачій сироватці, яка була протестована на наявність інфекційних речовин та виявлена як негативна. Проте, її слід розглядати як таку, що здатна передавати інфекційне захворювання, тому будьте обережні при використанні.

ВИЗНАЧЕНІ ЗНАЧЕННЯ

Призначені значення, які відрізняються від партії до партії, наведені на етикетці кожного флакона.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до вимог місцевого законодавства.

