

АМІАК/ЕТАНОЛ КОНТРОЛІ

CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS

Кат. №: 5-163

Дата випуску інструкції: 07-2022



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва набору	Склад набору	Кат. №
CORMAY КОНТРОЛІ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ	3 x 3 мл (мл)	5-163
КОНТРОЛЬ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ 1	1 x 3 мл (мл)	
КОНТРОЛЬ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ 2	1 x 3 мл (мл)	
КОНТРОЛЬ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ 3	1 x 3 мл (мл)	

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Набір КОНТРОЛІВ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ CORMAY призначений для контролю якості визначень етанолу та аміаку.

Контрольні препарати готують з бичачого сироваткового альбуміну з додаванням хімічних речовин, консервантів та стабілізаторів.

Реагенти повинні використовуватися лише для діагностики *in vitro* кваліфікованим лабораторним персоналом, лише за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Нерозкриті контролі стабільні при температурі 2-8 °C (°C) до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Стабільність після відкриття: 20 днів при 2-8 °C (°C) щільно закритими.

ПРОЦЕДУРА

Контролі готові до використання.

- До початку використання контролі необхідно довести до кімнатної температури!
- Обережно та акуратно перемішайте контролі перед використанням.
- Не залишайте контролі при кімнатній температурі протягом тривалого періоду часу. Після використання зберігайте флакони щільно закритими в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Не використовуйте контролі після закінчення терміну придатності.
- Не міняйте кришки та заглушки.
- Каламутність контролів може означати забруднення. Не використовуйте каламутні контролі.
- Контролі не призначені для використання в якості стандарту.
- КОНТРОЛІ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ CORMAY відповідають критеріям класифікації відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008.

Інгредієнти:

КОНТРОЛІ АМІАКУ/ЕТАНОЛУ CORMAY містять 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-опе.

Увага:

- H317: Може викликати шкірну алергічну реакцію.
- P280: Одягати захисні рукавички.
- P261: Уникайте дихання спреєм.
- P363: Випрати забруднений одяг перед повторним використанням.

R302+P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промити великою кількістю мила та води.

R333+P313: У разі подразнення шкіри або висипу: Зверніться до лікаря.



ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

КОНТРОЛЬ 1 АМІАКУ/ЕТАНОЛУ			Лот: 207-57
КОМПОНЕНТ	СЕРЕДНЄ		ДІАПАЗОН
Аміак	52.8	мкг/дл (µg/dl)	37.5-68.1
	31.0	мкмоль/л (µmol/l)	22.0-40.0
Етиловий спирт	37.0	мг/дл (mg/dl)	30.0-44.0
	8.03	ммоль/л (mmol/l)	6.51-9.55
КОНТРОЛЬ 2 АМІАКУ/ЕТАНОЛУ			Лот: 207-57
КОМПОНЕНТ	СЕРЕДНЄ		ДІАПАЗОН
Аміак	179	мкг/дл (µg/dl)	143-215
	105	мкмоль/л (µmol/l)	84.0-126
Етиловий спирт	90.0	мг/дл (mg/dl)	72.0-108
	19.5	ммоль/л (mmol/l)	15.6-23.4
КОНТРОЛЬ 3 АМІАКУ/ЕТАНОЛУ			Лот: 207-60
КОМПОНЕНТ	СЕРЕДНЄ		ДІАПАЗОН
Аміак	482	мкг/дл (µg/dl)	385-579
	283	мкмоль/л (µmol/l)	226-340
Етиловий спирт	244	мг/дл (mg/dl)	195-293
	52.9	ммоль/л (mmol/l)	42.3-63.6

Приписані значення є специфічними для номеру партії контрольного матеріалу. Кожній лабораторії рекомендується встановити власні значення та прийнятні діапазони.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Дотримуватися вимог місцевого законодавства.



ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.
Wiosenna 22,
05-092 Lomianki, Poland
phone: +48 (0) 81 749 44 00
fax: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.
вул. Віосенна, 22
05-092, м. Ломянки, Польща
тел.: +48 (0) 81 749 44 00
факс: +48 (0) 81 749 44 34
<http://www.cormay.pl>



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»
вул. Симона Петлюри, буд. 25
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
тел.: +380 (342) 77 51 22
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

