

# ЦИСТАТИН С КАЛІБРАТОРИ

## CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS

Кат. №: 5-185

Дата випуску інструкції: 08-2021



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Набір CORMAY КАЛІБРАТОРИ ЦИСТАТИНУ С призначений для калібрування визначення цистатину С у сироватці та плазмі людини на автоматичних аналізаторах.

Калібратори повинні використовуватися тільки для діагностики *in vitro*, кваліфікованим персоналом лабораторії, тільки за призначенням, за відповідних лабораторних умов.

### ВСТУП

Цистатин С - це білок з низькою молекулярною вагою (13 кД (kD)), один з інгібіторів протеїнази цистеїну. Цистатин С виробляється у всіх нуклеофілізованих клітинах і секретується у позаклітинний простір з постійною швидкістю. Стабільність молекули цистатину С і залежність її концентрації виключно від GFR (швидкість клубочкової фільтрації) визначають високу діагностичну ефективність визначення цистатину С. На рівень цистатину С не впливає м'язова маса чи дієта, і навіть спостерігається його збільшення при незначному зниженні GFR. Клінічні застосування цистатину С призначені для моніторингу GFR у дітей, літніх пацієнтів, пацієнтів з потенційно нефротоксичною лікарською терапією, для оцінки стану трансплантації нирок, для моніторингу функції нирок при гострих та хронічних захворюваннях нирок, включаючи діабетичну нефропатію.

### ПАКУВАННЯ

	Розмір
КАЛІБРАТОР 1	1 x 1 мл (ml)
КАЛІБРАТОР 2	1 x 1 мл (ml)
КАЛІБРАТОР 3	1 x 1 мл (ml)
КАЛІБРАТОР 4	1 x 1 мл (ml)
КАЛІБРАТОР 5	1 x 1 мл (ml)
КАЛІБРАТОР 6	1 x 1 мл (ml)

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Калібратори готові до використання.
- Не відкриті калібратори стабільні при 2-8 °C (°C) до дати закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
- Калібратори після відкриття стабільні протягом 6 місяців, якщо вони зберігаються в холодильнику щільно закритими.
- Не дозволяйте калібраторам стояти протягом тривалого періоду часу при кімнатній температурі.
- Не заморозуйте калібратори!

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРИМІТКИ

- Не використовуйте калібратори після закінчення терміну придатності.
- Сироватка, використовувана при виробництві калібраторів, перевіряється на HBsAg, анти-VГС, проти ВІЛ-1 та проти ВІЛ-2, і виявлена негативною. Тим не менш, матеріали містять речовини людського походження і повинні бути оброблені з належною обережністю.
- Калібратори містять антибіотики в якості консерванта, і з ними слід звертатися з належною обережністю.

### ПРИПИСАНІ ЗНАЧЕННЯ

Точна концентрація цистатину С надрукована на етикетці кожного флакону.

### ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Калібратор цистатину С калібрується за допомогою чистого цистатину С людини.

### УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Відповідно до місцевих вимог.



### ВИРОБНИК

PZ CORMAY S.A.  
Wiosenna 22,  
05-092 Lomianki, Poland  
phone: +48 (0) 81 749 44 00  
fax: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>

ПЗ КОРМЕЙ С.А.  
вул. Віосенна, 22  
05-092, м. Ломянки, Польща  
тел.: +48 (0) 81 749 44 00  
факс: +48 (0) 81 749 44 34  
<http://www.cormay.pl>



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТОВ «Діамеб трейд»  
вул. Симона Петлюри, буд. 25  
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна  
тел.: +380 (342) 77 51 22  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

