

ПЕДІАТРИЧНИЙ КАЛІБРАТОР

Pediatric Calibrator

Каталог. №: **A00706**

Дата випуску інструкції: **2012/11**
Версія **03**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкий калібратор, людського походження, призначений для використання в якості калібратора в імунотурбідиметричних аналізах

Кат. №	Вміст	
A00705	1 x 1 мл	Педіатричний калібратор
A00706	1 x 5 мл	Педіатричний калібратор

СКЛАД

Педіатричний Калібратор – це розведення дефібринованої людської плазми з фосфат буферизованим розчином, рідина стабілізована і профільтована через 0.2 мк.

Азид натрію: 0,095 %

ПІДГОТОВКА

Калібратор є рідким, і готовим до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °C
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °C
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте цей Калібратор таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте Калібратору досягнути кімнатної температури (22-28 °C) перед використанням.
- Калібратор не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

- Для використання в in vitro діагностиці.
- Кожна окрема донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки, тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ДАНИ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.

ЛОТ: MPP009		Термін придатності: 2016/01
Параметр	Визначене значення*	
α-2 Макроглобулін	30.90 мг/дл	
Трансферин	39.10 мг/дл	
IgA	29.80 мг/дл	

IgG	134.80 мг/дл
IgM	17.90 мг/дл
Карра легкий ланцюг**	35.90 мг/дл
Lambda легкий ланцюг**	18.90 мг/дл
*Значення простежуються до ERM-DA470 від IFCC.	
**Значення базуються на матеріалі Dade Behring.	



ВИРОБНИК

Діалаб GmbH
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджекст М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

