

КАЛІБРАТОРИ СРБ (УНІВ. РІВЕНЬ)

CRP Uhs Calibrator Set (univ. range)

Каталог. №: **D04561**

Дата випуску інструкції: **2012/11**
Версія **02**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкі калібратори, людського походження, призначені для використання в якості калібраторів в імунотурбідиметричних аналізах для СРБ

Кат. № **D04561** **Вміст** 5 x 1мл **Набір калібраторів CRP Uhs**
(для універсального діапазону)

СКЛАД

Набір калібраторів CRP Uhs Dialab для універсального діапазону – це набір з 5 рідких калібраторів на основі людської сироватки з 5 різних концентрацій.

ПІДГОТОВКА

Калібратори є рідкими, і готові до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °С
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 3 тижнів при 2-8 °С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте ці Калібратори таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте Калібраторам досягнути кімнатної температури (22-28 °С) перед використанням.
- Калібратори не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

- Для використання в *in vitro* діагностиці.
- Кожне окреме донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ДАНИ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.
Значення Набору Калібраторів CRP базуються на IFCC/BCR/CAP референтному матеріалі для 15 протеїнів плазми CRM470.

Лот: 14864		Термін придатності: 2013/01	
Рівень	ЛОТ	Визначене значення	
		мг/дл	мг/л
Рівень 1	14864	0.845 мг/дл	8.45 мг/л
Рівень 2	14865	2.045 мг/дл	20.45 мг/л
Рівень 3	14866	10.00 мг/дл	100.0 мг/л
Рівень 4	14867	20.00 мг/дл	200.0 мг/л

Рівень 5	14868	35.00 мг/дл	350.0 мг/л
Значення базуються на CRM 470.			



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕВ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

