

НАБІР РЕАГЕНТІВ DIATRO VET5

Diatro-Vet5 Reagent Pack

Кат. №: **DRP02HK**

Дата випуску інструкції: **15-06-2020**
Версія **4.1**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпасти.

Diatro-Vet5 Reagent Pack

Набір реагентів для ветеринарії для автоматизованого аналізу

Код продукту: **DRP02HK** 1 x пакет

Тільки для діагностики *in vitro*

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Набір реагентів Diatro-Vet5 WBC-5-Diff - це ветеринарний набір реагентів для підрахунку еритроцитів (RBC), тромбоцитів (PLT), для вимірювання гемоглобіну (HGB) та для кількісного визначення лейкоцитів (WBC), диференціації 5 частин лейкоцитів (LYM, MON, NEU, EOS, BAS) у крові тварин на гематологічних аналізаторах Abacus Vet5.

Набір реагентів Diatro-Vet5 слід використовувати лише з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовувати зі сторонніми реагентами.

Будь ласка, зверніться до Посібника користувача приладу для отримання додаткової інформації.

ІНГРЕДІЄНТИ

Розчинник	10.0 л
Лізуючий	0.3 л
Промивний розчин	0.5 л
Очищувач	0.3 л
Лізуючий-2	0.8 л

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Набір реагентів Diatro-Vet5 WBC-5-Diff для ветеринарії не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи (GLP) при роботі з реагентами.

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Набір реагентів Diatro-Vet5 WBC-5-Diff для ветеринарії призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в антикоагулянт ЕДТК. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C).

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зніміть впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключіть впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Переконайтеся, що кольори на кожній трубці, етикетці контейнера для реагенту та роз'єми на задній панелі приладу збігаються.
- Уникайте забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливайте і не змішуйте залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно праймуйте новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібруйте прилад, як вказано в Інструкції користувача.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА

- Зберігати Набір реагентів Diatro-Vet5 WBC-5-Diff для ветеринарії при температурі від 4 до 32 °C.
- Термін придатності Набору реагентів Diatro-Vet5 становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Утилізуйте відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовуйте реагент після заморожування.
- Утилізуйте відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.



ВИРОБНИК

DIATRON MI PLC.
вул. Таблас, 39
H-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809
www.diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

